

軽量型電動車いす

JWアクティブPLUS+

電動走行距離/1充電
(4.5km/h仕様)

ニッケル水素バッテリー

15km

リチウムイオンバッテリー

30km

電動走行距離は、バッテリー新品、常温
15～25℃、直線平坦路連続走行時



Sタイプ



Pタイプ

介護保険対象品

補装具対象品

試乗申し込みはコチラ▼

Sタイプ/写真は22インチ、ニッケル水素バッテリー、介助用操作部付
Pタイプ/写真は22インチ、ニッケル水素バッテリー、介助用操作部付

● TAISコード



仕様	Sタイプ	Pタイプ
ニッケル水素バッテリー仕様・介助用操作部有り	00233-000095	00233-000097
リチウムイオンバッテリー仕様・介助用操作部有り	00233-000116	00233-000114
ニッケル水素バッテリー仕様・介助用操作部無し	00233-000102	00233-000104
リチウムイオンバッテリー仕様・介助用操作部無し	00233-000115	00233-000113



アームサポート
高さ調節が可能

※写真はPタイプ

JWアクティブPLUS+ 比較表

	フレームカラー	カラーキャップ	アームサポート跳ね上げ方式	背張り調整	重量※
Sタイプ	スーパーホワイト	ホワイトパール	アームサポートのみ跳ね上げ	あり	27.4kg
Pタイプ	ガンメタリック	ストームシルバー	スカートガードから跳ね上げ	なし	28.7kg

詳しくはWEBサイトへ▼



※バッテリー含まず



跳ね上げ式アームサポート、
スイングアウト取り外し式フットレグ
サポートで移乗がラクラク

※写真はPタイプ



レバーによる手動と
電動の切り替え



腰や背中を面で
支える背張り機能

※Sタイプのみ装備



折り畳みにより
コンパクトな
収納が可能

※写真はPタイプ



車などへの積載時、
背折れ機構でさらに
コンパクトな収納が可能

※写真はPタイプ

ジョイスティックタイプの主な特徴

※ヤマハのジョイスティックは感度調整式です。

液晶画面搭載

- 5段階の速度設定を常に表示
- バッテリー残量を数値 (%) でお知らせ




スライドブラケット ※JWアクティブ PLUS+(S・Pタイプ)に標準装備
●机に近づく際など、自走用操作部を格納させることが可能



※液晶画面は撮影用に点灯したもので、実際の走行状態を示すものではありません。

USB電源ポート

- スマートフォンも充電可能
- ※一部、動作しない機器があります。

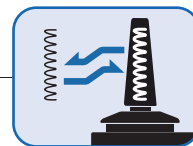

ジョイスティックの操作荷重の調整

- バネを交換することでジョイスティックを動かすのに必要な力を調整できます。

※イラストはイメージになります。
※P.8のジョイスティック形状とあわせてご確認ください。



格納の状態



出ている状態

転倒防止バー出し忘れお知らせ機能
●音とアイコンでお知らせ



ACサーボモーター



坂道ストップ
電磁ブレーキ標準装備



家庭用コンセントから
かんたん充電
※写真はニッケル水素バッテリー



介助者の負担を軽減
介助用操作部 (オプション)



●ヤマハオリジナル 車いす走行機能制御システム
ジェイダブリュ スマート コア

ジョイスティックタイプに様々な制御技術を搭載。さらに操作しやすくなりました。



速度制御

お客様の操作能力に合わせて、最高速度を調整できます。





加速度制御

最高速度までの距離を短くしたり、長くしたりすることができます。



減速度制御

停止するまでの時間の調整ができるので、より緩やかな動きに調整することができます。

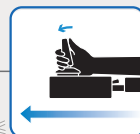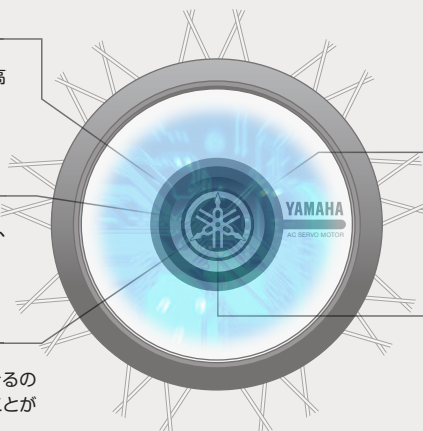

有効範囲制御

例えば「狭い」を選択することで、ジョイスティックを少ししか動かさなくても最高速度で使うことができます。



入力方向切り替え制御

前後方向、左右方向それぞれの入力方向を反転させることができます。



●ヤマハ電動車いす専用ソフト

ジェイダブリュ スマート チューンで、制御システムの設定が変更できます。



JW Smart Tune 設定変更



専用ソフトJW Smart Tuneを使い、パソコンで、お乗りになる方のお身体の具合や使い方・環境に合わせて設定を変更可能です。

※JW Smart Tuneでは、仕様を変更することはできません。(例:4.5km/h仕様の車いすを6km/h仕様に変更する等)

※JW Smart Tuneの設定については、ご購入店、取扱店にご相談ください。