

介護保険(購入) 組立不要 特許取得済

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

くるくるチェアD

座面くるくる介護らくらく！
狭い部屋でも移動すいすい！

座面高さ調節	フットレスト高さ調節	短奥行仕様
肘掛けはね上げ	座シート取り外し	段差超え
ノーバンクタイヤ	4輪自在	フットプレートはね上げ
フットレスト脱着	ストッパー	セーフティ/セーフティロック

※各機能説明はP3～4参照

座面の高さ調節

5段階

(42～50cm/2cm刻み/O型)
(41～49cm/2cm刻み/穴無し)
(40.5～48.5cm/2cm刻み/U型)

ストッパー

●足元ストッパー(後輪) ●キャスターロック(前輪)

その他

●座面回転機能

■O型シート
品番:KRU-172
¥107,800 (税込)
(本体価格¥98,000)



■穴無しシート
品番:KRU-173
¥110,000 (税込)
(本体価格¥100,000)



■O型シート
品番:KRU-172-SA
¥110,000 (税込)
(本体価格¥100,000)



■穴無しシート
品番:KRU-173-SA
¥112,200 (税込)
(本体価格¥102,000)




■U型シート
品番:KRU-174-SA
¥110,000 (税込)
(本体価格¥100,000)



座面は360°回転



ストッパーがついて安心

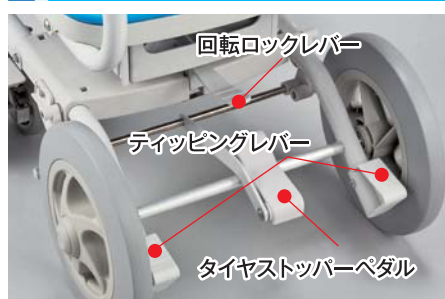

さらにコンパクトに！



短奥行仕様


全てのシートタイプで
付け替え可能です。

座面は360度回転(45度ごとにロック)します。回転ロックレバーを踏み、ハンドルで左右に回すと回転します。
短奥行仕様時にフットプレートを折りたたんだ状態での回転操作は座面高さ3段階目からとなります。

足元ストッパー採用。片足でワンタッチロックできます。前輪キャスターの車輪ロックレバーで4輪ロックが可能です。後輪はノーバンクタイヤです。
※後輪ストッパーをかけないと回転ロックレバーを押しても座面の回転はできません。

フットプレートを前輪上部に取り付け可能。奥行70cmとコンパクト。狭い場所でも楽に取り回しできます。(短奥行仕様)

規格図

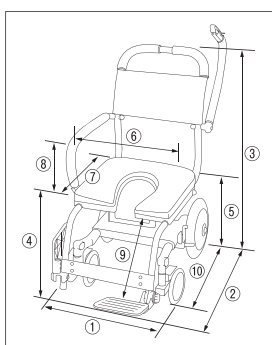

サイズ

① 幅	47cm
② 奥行	85(70)cm
③ 高さ(ハンドル高さ)	86～94cm
④ 前座高	42～50cm(O型) 41～49cm(穴無し) 40.5～48.5cm(U型)
⑤ 後座高	40～48cm
⑥ 座幅(肘～肘)	39[40]cm
⑦ 座奥行	40cm
⑧ 肘から前座	19.5[24]cm
⑨ 前座から足台	32.5/35/37.5cm
⑩ 断折(ワイド型)	57.5cm
前輪キャスター	5インチ
後輪タイヤ	10インチ

※()内の数字は短奥行仕様時のサイズです。

※[]はセーフティタイプ

仕様

品名	くるくるチェアD		
品番	KRU-172(O型) KRU-173(穴無し) KRU-174(U型) KRU-172-SA(セーフティO型) KRU-173-SA(セーフティ穴無し) KRU-174-SA(セーフティU型)		
材質	本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス シート/EVA 背シート/ナイロンメッシュ		
重量	約13kg(セーフティ約13.5kg)		
耐荷重	100kg		
介護保険	購入対象品		
JANCODE	4519283002572(O型) 4519283002589(穴無し) 4519283002596(U型)	4519283003982(セーフティO型) 4519283003999(セーフティ穴無し) 4519283004002(セーフティU型)	
TAISコード	00129-000108(O型) 00129-000109(穴無し) 00129-000089(U型)	00129-000193(セーフティO型) 00129-000194(セーフティ穴無し) 00129-000195(セーフティU型)	

※公的介護保険対象商品につきましては、各市区町村の介護保険担当窓口までご確認ください。