


安全でスムーズな移乗を支援するスライディングボード

イージーモーション

介護保険貸与対象品 | 特殊寝台付属品

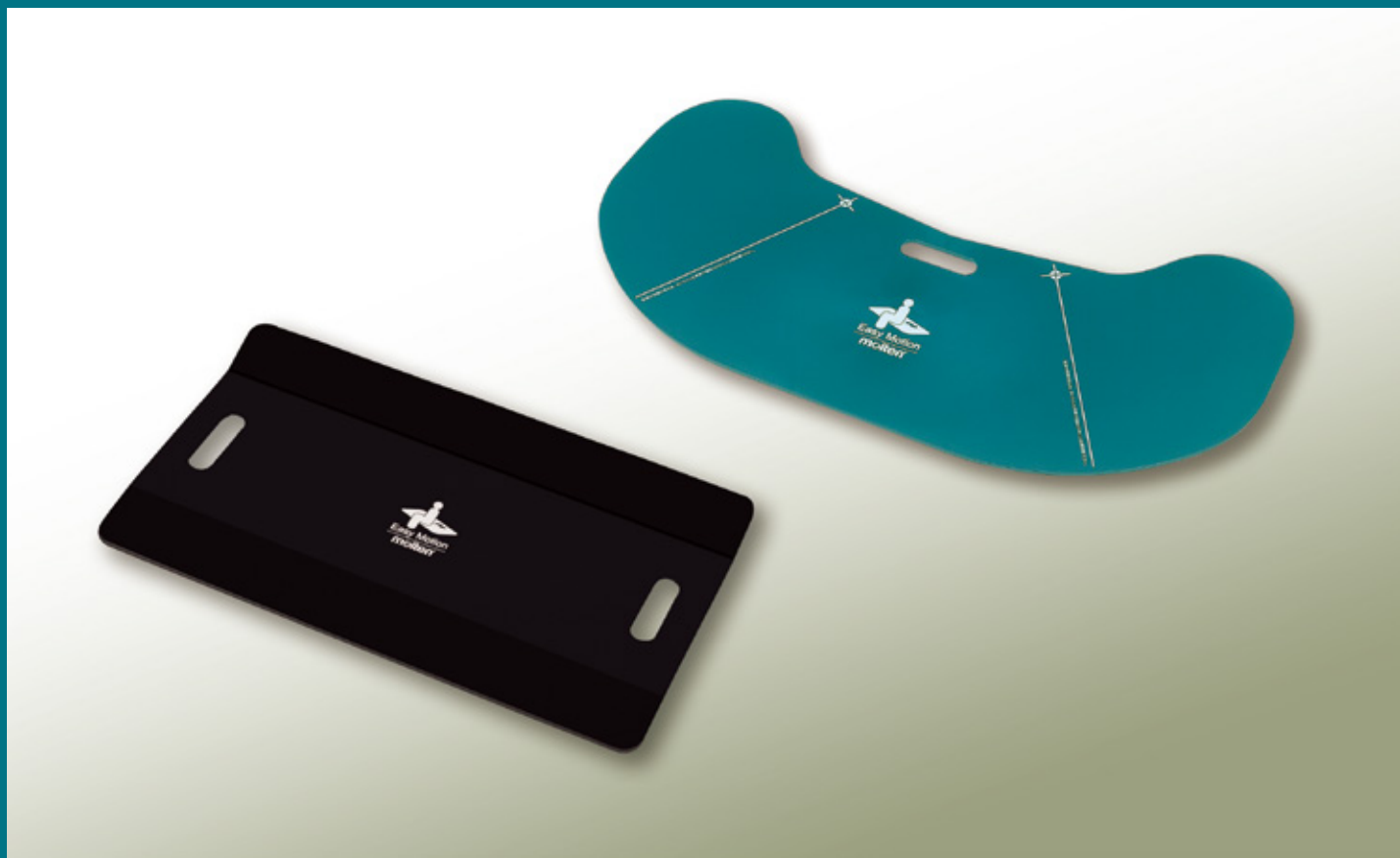

車いすと介護用ベッド利用時の必需品



スライディングボードを使った移乗に必要な福祉用具の条件とは

ベッド

- ◆高さ調整ができるもの

車いす

- ◆アームレスト(ひじ掛け)が取り外しまたは跳ね上げ可能なもの
- ◆フットレスト(足のせ)が取り外しまたは回転可能なもの


マットレス

- ◆ふわふわし過ぎず、端座位が安定するもの
(エアマットレスの場合は空気を抜いて移乗する)

イージーモーションを使った移乗方法【ベッドから車いすへ】



1. ベッド上で上半身を起こして端座させます。

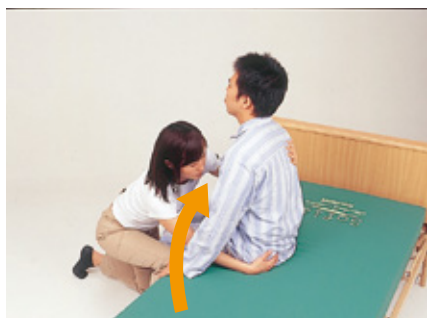

2. 移乗しやすいように臀部を前方へ移動させます。




3. 車いすを準備します。



4. 車いすをベッド脇に持ってきます。




5. 移乗する側の臀部を浮かし、ボードを差し込みます。

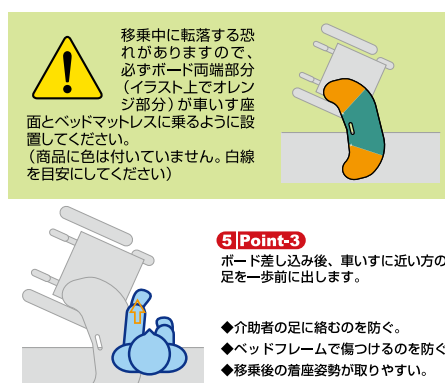


6. ボード上を滑らせます。

移乗前半

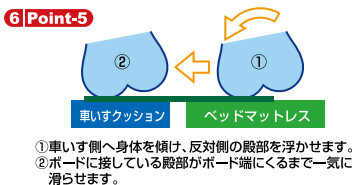

移乗後半

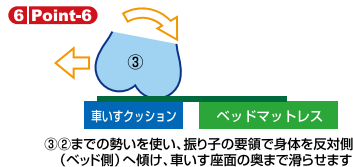

介助者の身体への負担を軽減するために

介助者が特に腰を痛めないようにするため、下記の点にも注意してください。

- ◆ 移乗中はできるだけ腰を落とし、重心を下げる。
- ◆ 要介助者を力だけで無理に引っ張ったり、持ち上げたりしないこと。

7. ボードを抜きます。



8. アームレストとフットレストを取り付けます。



9. 移乗完了です。



イージーモーションを使った移乗方法【車いすからベッドへ】

1. 車いすをベッド脇に付けます。



2. 移乗する側の股部を浮かし、ボードを差し込みます。



3. ボード上を滑らせます。

移乗前半



移乗後半



介助者の身体への負担を軽減するために

介助者が特に腰を痛めないようにするため、下記の点にも注意してください。

- ◆ 移乗中はできるだけ腰を落とし、重心を下げる。
- ◆ 要介助者を力だけで無理に引っ張ったり、持ち上げたりしない。


4. ボードを抜きます。




5. 移乗完了です。



基本的な使い方のパターン

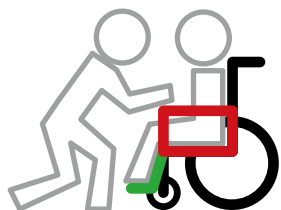

介助あり
車いす＝アーム・フットレスト
取り外し可能

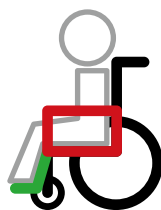

介助なし
車いす＝アーム・フットレスト
取り外し可能



介助あり
車いす＝アーム・フットレスト
取り外し不可





介助なし
車いす＝アーム・フットレスト
取り外し不可

⚠ 移乗中転落などの危険がありますので、このパターンでの移乗には使用できません。

使い方に合わせて選べる2タイプ


■Bタイプ(ブーメラン型)

独自のブーメラン形状により、ベッド側・車いす側ともに接地面積が広く取れ、より安全で安定した移乗ができます。かための素材で長さもあるため、ベッドと車いすの間隔が広い場合の移乗に最適です。

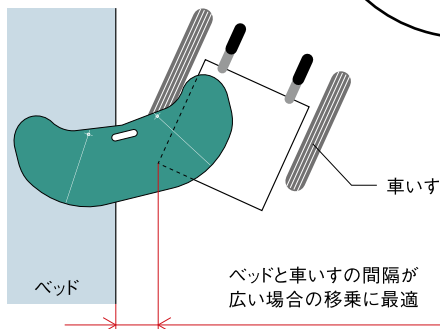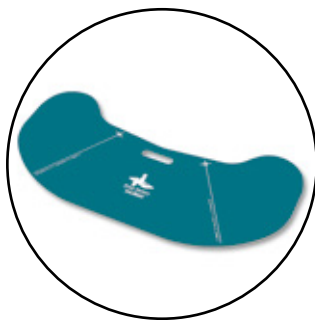


■Sタイプ(長方形型)

一般的な長方形型のスライディングボードです。柔らかめの素材で抜き差しがしやすく、ベッドと車いすの間隔が狭い場合の移乗に最適です。

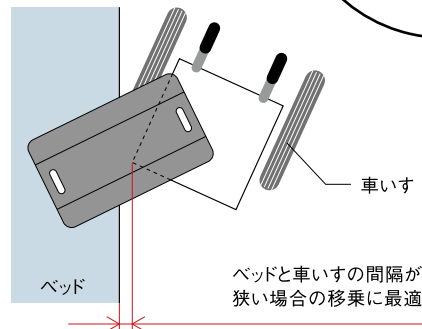

使いやすさへの配慮

表面の優れた滑り特性で、よりスムーズで楽な移乗が可能になりました。また、裏面には移乗中にボード自体がベッドや車いすから外れる危険性をなくするため、滑り止めシートを標準装備しています。

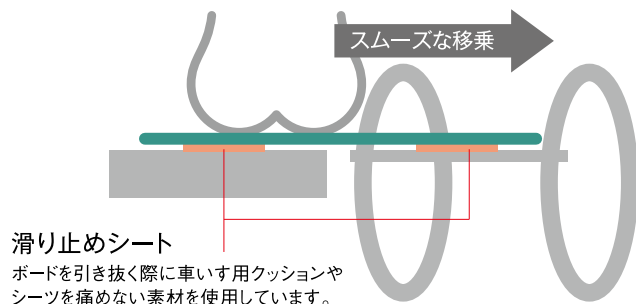

優れた耐荷重特性と耐久性

イージーモーションは130kgの荷重に耐えられます。また、しなりのある素材を使用しているので、折れ曲がりにくく耐久性にも優れています。



イージーモーション仕様

Bタイプ (ブーメラン型)



TAISコード:00054-000032 品番:MEMV

●サイズ:長さ78×幅38×厚さ0.5cm ●重量:1.2kg ●素材:ABS樹脂(裏面滑り止めシート付き)

定価:本体 **16,000円+税**

Sタイプ (長方形型)



ATISコード:00054-000062 品番:MEMSQ

●サイズ:長さ59×幅35.6×厚さ0.5cm ●重量:1.0kg ●素材:ポリプロピレン(裏面滑り止めシート付き)

定価:本体 **16,000円+税**

取扱店

開発・製造元



※健康用品事業本部にて取得しています。

株式会社 **モルテン**

健康用品事業本部
www.molten.co.jp/health

お問い合わせ先
東京:03-3625-8510 大阪:06-6773-0425
札幌:011-261-7227 広島:082-842-6094
仙台:022-390-5131 福岡:092-441-0216
名古屋:052-252-0931