

SARAYA

サラヤ プラスチック手袋 E

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、世界的に使い捨てゴム手袋が品薄となり、価格も高騰している状況です。昨今の新型コロナウイルス感染拡大の状況下、一時的に供給が滞っていましたが、この度供給の目途が立ちましたので、ご案内申し上げます。

SARAYA

パウダーフリー



100枚入
サイズ/S・M・L・XL

サラヤ プラスチック手袋 E

PLASTIC DISPOSABLE GLOVES

- 素手感覚で使える、伸縮性のある薄手仕上げです。
- ムダなく使える左右兼用タイプです。
- 排泄・入浴介助や清拭時など、様々なシーンで使用できます。
- 手荒れに配慮した、ラテックスフリータイプです。

着脱方法

着け方



① 手首の部分をつかんで装着する

外し方



② 手袋を裏表逆になるように外す



③ 手袋を外した手を反対の手袋の袖口に差し込む



④ 裏表逆になるように外す



⑤ 外した手袋はすぐに廃棄する

手袋サイズ表

サイズ	S	M	L	XL
全長(mm)±5mm	235	240	245	245
掌幅(mm)±5mm	85	95	105	115

感染防御のポイント

- 手袋の表面に触れないように手袋を外しましょう。汚染されている可能性があります。
- 手袋を着ける前や、手袋を外した後は、必ず手洗いや手指消毒をしましょう。
- 血液や体液(唾液や排泄物など)に触れる作業前には、必ず手袋を装着しましょう。
- 手袋の使用は一回限りにしましょう。また、手袋を着用したまま手洗いや手指消毒をすることは避けましょう。

サラヤプラスチック手袋 粉なし100枚入


薄型で経済的。ポリ塩化ビニール製手袋。天然ゴムを含まず、手荒れに配慮。粉なし。ディスプレイザブルタイプ手袋。

- 素手感覚で使える、伸縮性のある薄手仕上げです。
- 無駄なく使える左右兼用タイプです。
- 排泄・入浴介助や清拭時など、さまざまなシーンで使用できます。
- 手荒れに配慮した、ラテックスフリータイプです。
- 材質: 塩化ビニール樹脂(PVC)
- サイズ: S、M、L、XL
- タイプ: パウダーフリー、左右兼用
- カラー: 透明

※本品はディスプレイザブル製品ですので、使用は1回限りとしてください。

※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けて下さい。

手袋サイズ早見表 この表で手幅を計り手袋サイズの目安を出します。

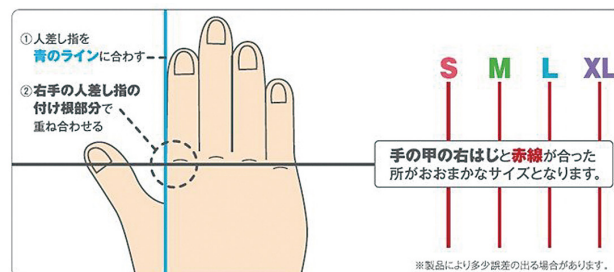

使用上の注意

- 本品はディスプレイザブル製品ですので、使用は一回限りとしてください。
- 品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けてください。

以前勤めていた病院で使って使いやすく、荒れる事もなかった為、定期的に購入し使用しています。

直方市 20代女性

定価: オープン価格

➡ **500円(税込)**

キャンペーン期間: 12月~2月

福祉用具のレンタル・販売・住宅改修も行います。

株式会社 介護サービス わかば

☎0949-22-0808